

血液検査器具

KF005
ポリドナー瓶

- ポリドナー瓶は、ガラス製と異なり操作上破損する心配がありません。
- 10個1箱単位に包装されていますので、使用時の取り扱いが容易です。

《仕様》

- ・材質：ポリプロピレン (P.P.製)
- ・寸法：外径φ20×長さ37mm
- ・目盛目安：1、2、5mL
- ・包装：500本1箱 (10本コンテナ×50) 入

¥14,000


KF101・102
ヘマトロン

- 特殊製法により内径が均一(±0.02mm以内)で精度の良いヘマトクリット値測定が可能です。
- 耐衝撃性が優れ、遠心時での破損が無く、カミソリ等で簡単に切断可能です。
- ヘマトシールで簡単シールできます。

《処理法》
プレイン

脱脂処理→蒸留水洗浄→30℃乾燥

ヘパリン処理

脱脂処理→蒸留水洗浄→ヘパリン処理→30℃乾燥

《仕様》

- ・材質：アクリル製
- ・包装：内径φ0.9×長75mm

コードNo.	処理	箱色	包装	価格
KF101	プレイン	青	100本×10入	9,000
KF102	ヘパリン	赤	100本×10入	12,000


KF110・113
ヘマトロンL

- 乳児のビリルビン及び血糖測定、その他超微量測定検査に使用できます。
- 1本で約0.05~0.07mLの血漿が採れ溶血しにくく、ヘマトシールで簡単にシールでき遠心できます。

《使用法》

乳児の踵又は指頭をアルコール綿消毒後、ランセット等で傷を付け、採血し、(7~8割位)シールします。

2,500回転/分、約5分遠心します。

《仕様》

- ・材質：アクリル製
- ・包装：内径φ1.4×長110mm
外径φ2.0×長110mm

コードNo.	規格			価格
KF110	ヘマトロン L	プレイン	青	100本×10入 13,000
KF113	ヘマトロン L	ヘパリン	赤	100本×10入 15,000


KF120
ヘマトシール

- 特殊製法により製作されたシールですのでシール抜けがありません。
- プラスチック及びガラス製毛細管のどちらでも使用できます。
- 使用法は簡単で毛細管をシール内に完全に押し込んでシールできます。

《仕様》

- ・外寸法：W75×D45×H5mm
- ・包装：1ケース2枚入

¥2,300

